



# ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Для самотестирования. Не для самостоятельного использования детьми!**

Набор реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19-Антиген» по ТУ 21.20.23-008-23327034-2021, серия LSSPZ21H01

## РАПИД-COVID-19-Антиген

КОМПЛЕКТ 4

С помощью камеры телефона получите доступ к видеополучите инструкциям и обучающим материалам



1



Тщательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком

2




Проверьте комплект. Каждый Набор содержит: тест-картридж, флакон-капельницу с буферным раствором, пластиковую пробирку с насадкой-капельницей, стерильный зонд, перчатки, инструкцию по применению

3




Аккуратно высморкайтесь в салфетку

4

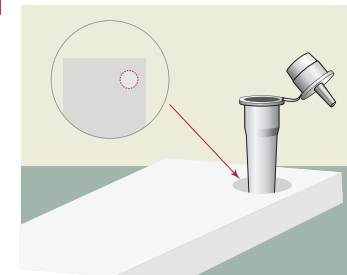


Вставьте пробирку в специально обозначенное место на коробке теста

5

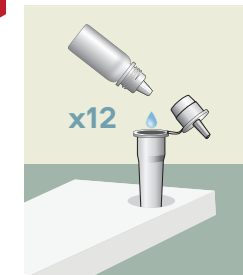

Откройте флакон-капельницу и добавьте 12 капель буфера в пробирку

6

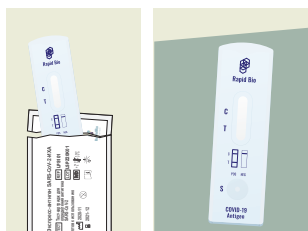


Достаньте тест-картридж из упаковки. Расположите его на ровной и чистой поверхности

7




Откройте стерильный зонд

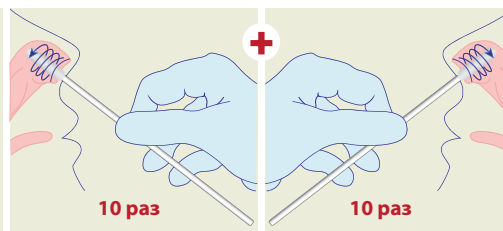


Введите наконечник зонда в ноздрю **на глубину 2–3 см** и сделайте 10 вращательных движений по внутренней стенке ноздри. Повторите процедуру, используя этот же тампон для другой ноздри

8

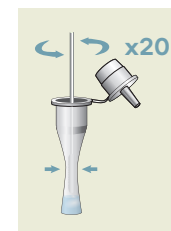

Вставьте зонд в пробирку и поверните 20 раз, слегка сжимая пробирку

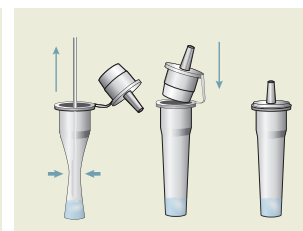

Извлеките зонд, сжимая пробирку. Закройте пробирку насадкой-капельницей

9



Все содержимое пробирки медленно, по каплям, внесите в тестовое окно

10



Запустите таймер. Оцените результат реакции визуально через 8-15 минут. В течение этого периода времени тест-картридж должен находиться в покое – его не следует передвигать, переворачивать и т.д.

11

**ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

ВИДНЫ 2 ЛИНИИ  
(ЛИНИЯ «Т» МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ ЯРКОСТИ)

**ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

ВИДНА ТОЛЬКО ЛИНИЯ «С»

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

НЕТ ЛИНИИ «С»

«С» - контрольная линия  
«Т» - тестовая линия

Если вы сомневаетесь в полученном результате, повторите тест и обратитесь за медицинской помощью